



CALPROSMART.

De beknopte handleiding - CalproSmart-app

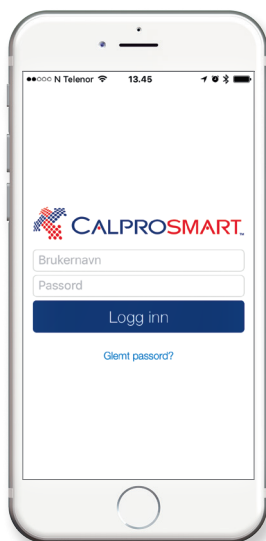

Stap één

Verzamel een monster

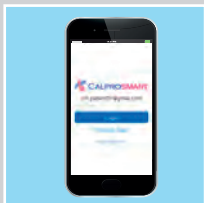


1

Open de CalproSmart app met uw inloggegevens en volg de instructies. We adviseren u de houdbaarheid van de testcassettes vooraf te controleren.




2

Trek de wc-bril omhoog.

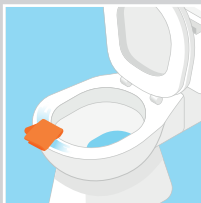


3

Veeg het toilet schoon met een tissue of toiletpapier om ervoor te zorgen dat het oppervlak schoon en droog is.

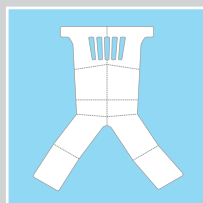


4

Vouw de EasySampler in het geheel uit.

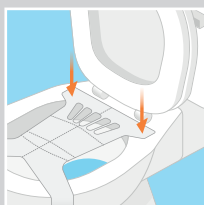

5

Plak de EasySampler op het toilet, beginnend aan de achterkant en dan aan de voorkant, zoals afgebeeld.

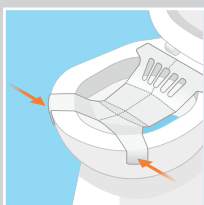

6

Controleer of je een voldoende groot oppervlakte hebt gemaakt om de ontlasting op te vangen en of er voldoende ruimte aan de voorkant is om je toiletpapier weg te gooien.



7

Zet tenslotte de wc-bril weer naar beneden en uw EasySampler is klaar voor gebruik.




8


Vang de stoelgang op in de EasySampler, maar vermijd erin te plassen.

Stap twee

Een monster extraheren

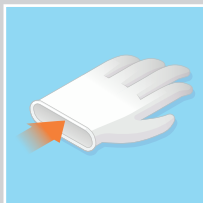

- 1**
Trek de nitril-
handschoenen aan.

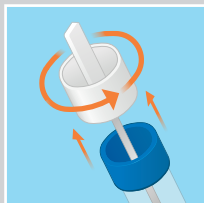


- 2**
Draai de witte dop
linksom en trek de
stick eruit.



- 3**
Plaats het extractie-
buisje op een plek
waar deze niet kan
omvallen, b.v. in een
kopje of glas.




- 4**
Steek het uiteinde van
de stick in het ontlastings-
monster op drie verschil-
lende plekken en draai
telkens rond. Probeer
graankorrels, vezels en
luchtballen in de groefjes
van de stick te vermijden.
Zorg ervoor dat beide
groefjes aan het uiteinde
van de stick gevuld zijn.

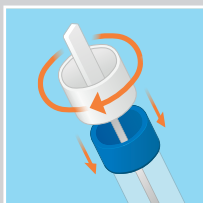


- 5**
Plaats de stick terug
via het blauwe uiteinde
van het extractiebuisje
en draai deze met de
klok mee totdat u een
klik voelt.

Overtollige ontlasting
wordt weggeveegd in
het blauwe trechterdeel
van het buisje.

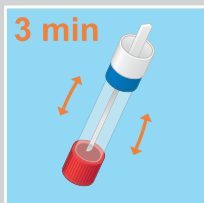


- 6**
Zorg ervoor dat
het extractiebuisje
volledig gesloten is
en schud vervolgens
gedurende 3 minuten
en gebruik de app
om de tijd te meten.

Stap drie De test

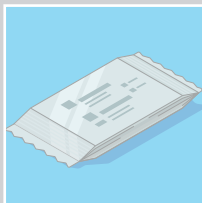


1

Open het aluminiumfolie zakje en controleer of de testcassette of het testvenster niet beschadigd is.

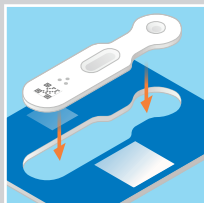


2

Plaats de cassette in de cassettehouder.

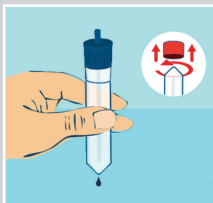

3

Verwijder de rode dop en gooi de eerste druppel weg. Veeg het uiteinde van het extractiebuisje af met papier om ervoor te zorgen dat deze droog is.

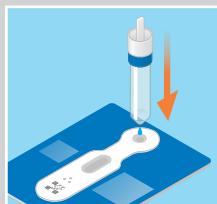

4

Houd het extractiebuisje rechtop boven de sneltestcassette in een hoek van 90 graden en druppel 2 druppels in de cirkelvormige opening. De vloeistof ziet u nu binnen enkele seconden stromen in de ovale opening van de testcassette.

Als dit na 30 seconden niet gebeurt, voeg dan nog een (1) druppel toe.




5

Laat de cassette voor 15 minuten bij kamertemperatuur liggen en gebruik de app om de tijd te meten.

Stap vier

Voer de test uit

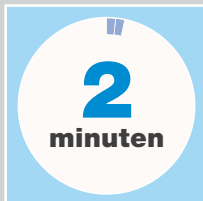

1

Na 15 minuten wordt uw camera automatisch geactiveerd. U heeft dan 2 minuten om de meting uit te voeren met stap 2 en 3.





2

Houd uw smartphone zo boven de cassette dat de gele kaders op uw scherm samenvallen met de randen van de cassettehouder en het groene vierkant de QR-code op de testcassette bedekt.



3

Beweeg uw smartphone iets op en neer totdat de app de QR-code, testlijn en controlelijn detecteert en de app automatisch het resultaat vertoont.

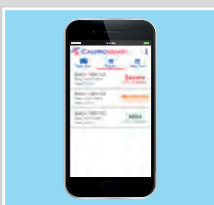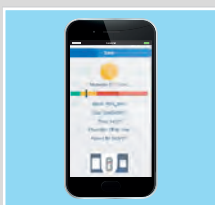

4

De calprotectine-waarde wordt op het scherm weergegeven met een verkeerslichtresultaat:

Groen = milde ziekte-toestand (minder dan 77 tot 200 mg/kg)


Oranje = matige ziekte-toestand (200 tot 500 mg/kg)

Rood = ernstige ziekte-toestand (meer dan 500 mg/kg)

Uw testresultaat wordt automatisch doorgestuurd naar uw zorgteam.


Uw volledige geschiedenis van testresultaten wordt in de app opgeslagen en kan op elk moment worden bekeken.

Stap vijf Opruimen

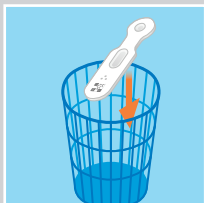


1

Nadat u de test heeft afgelezen, kunt u de testcassette weggooien.

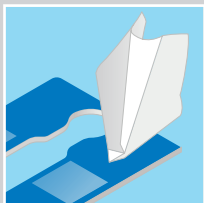

2

Maak cassettehouder schoon en bewaar deze voor later gebruik.

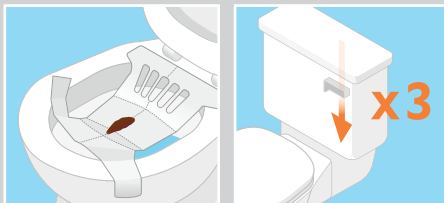

3

Maak de EasySampler los van het toilet en spoel deze weg. Herhaal het wegspoelen indien nodig twee of drie keer.



4

Gooi het extractiebuisje, de nitrilhandschoenen en de tissues weg in de afvalbak.